

# ピューラックス6% 用途・希釈早見表

用法	水の量に対するピューラックスの分量				
	1L	2L	3L	5L	10L
飲食器具の消毒 食品製造器具の消毒 医療器具の消毒 300倍希釈 0.02%次亜塩素酸ナトリウム	3.3mL	6.7mL	10.0mL	16.7mL	33.4mL
病院のシーツ・包帯・ 白衣・おしめ等の 漂白を兼ねた消毒 200倍希釈 0.03%次亜塩素酸ナトリウム	5.0mL	10.1mL	15.1mL	25.1mL	50.3mL
吐物・ふん便の処理 60倍希釈 0.1%次亜塩素酸ナトリウム	16.9mL	33.9mL	50.8mL	84.7mL	169.5mL

※小数点以下第2位を四捨五入

**注意**

- 酸との混合により有毒ガスが発生します。酸性の製品や、その他の製品と混合・併用しないでください。
- 金属に使用した場合にサビの原因となりますのでご注意ください。
- 色柄物に使用した場合、漂白または変色しますので使用を避けてください。

株式会社 オーヤラックス

本社

〒102-0083 東京都千代田区麹町1-6-2

TEL **03-3263-6201**